

Autoklavierbare Teile (im Autoklav nach EN 13060 Klasse B)

ULTRADENT

Gerät bzw. Komponenten	Teilebezeichnung	Teile-Nr.	autoklavierbar*	Bemerkungen
Wassereinheiten	Saughandstücke Fa. Dürr		134°C	
	Kugelgelenk Fa. Dürr	7600A03000,7600S03000	134°C	
Arztgeräte	Köchereinsätze		134°C	
Traytablett	Abnehmbarer Silikonüberzug am Griff	14040050	134°C	
	Trayauflage weiß Silikon	70000422	134°C	
Leuchte Solaris	Griffe	86E0000028	134°C**)	
Leuchte Solaris 2	Griffe	34005	134°C	
Speischale rund neu (ab 04/2012)	autoklavierbar und thermodesinfizierbar	55000400, 55130000	134°C	
Speischale oval neu (ab 011/2014)	autoklavierbar und thermodesinfizierbar	8380	134°C	
Spritzen 3-Wege, Sprayvit 4000	Kanüle + Griffhülse (getrennt voneinander)	91745051/8737../87380; 89510	134°C	
Micromotor KL 7S	Motor (ohne Schlauch)	8234	134°C**)	
Micromotor K2	Nur abnehmbare Motorhülse	8430	134°C	
Chir. Motore	Motor samt Schlauch	833910	134°C	
ZEG Newtron, Newtron Licht	Nur abnehmbares Handstück ohne Spitze	8387, 838710	134°C	
Elektrochirurgie	Nur abnehmbares Handstück ohne Elektroden	2805	134°C	
Mini LED Polymerisationslicht	Nur Lichtleiter	8185	134°C	
Pulverstrahlgerät Propyphen	Düse und Handstück	8302	134°C	
Beachten Sie die Sterilisationskennzeichnungen auf den Komponenten. Sterilisation mittels Heißluftsterilisatoren ist nicht zulässig!			*) 134°C, 2,1bar, min. 3 Minuten Haltezeit **) verpackt	
Nicht sterilisierbare Komponenten:				
U1280 Schwingengerät	Griffhülse UT1280 (aus POM)	26.000-244	Nein	spezielle Anfertigung
Druckwasserflaschen		8128F,8164F,819090	Nein	
Instrumentenschläuche			Nein	Ausnahme:Schlauch chir.Motor