

Gerät bzw. Komponenten	Teilebezeichnung	Teile-Nr.	autoklavierbar*	Bemerkungen
Wassereinheiten	Saughandstücke Fa. Dürr		ja	
	Kugelgelenk Fa. Dürr	7600A03000,7600S03000	ja	
Arztgeräte	Köchereinsätze		ja	
Traytablett	Abnehmbarer Silikonüberzug am Griff	14040050	teilweise	
	Trayauflage weiß Silikon	70000422	ja	
Leuchte Solaris	Griffe	86E0000028	ja	
Leuchte Solaris 2	Griffe	340005	ja	
Speischale rund neu (ab 04/2012)	autoklavierbar und thermodesinfizierbar	55000400, 55130000	ja	
Speischale oval neu (ab 011/2014)	autoklavierbar und thermodesinfizierbar	8380	ja	
Spritzen 3/6-Wege	Kanüle + Griffhülse (getrennt voneinander)	91745051/8737.../87380; 89510 8741, 87410, 8742, 87420	teilweise	
Micromotor KL 7S	Motor (ohne Schlauch)	8233, 8234	ja	
Micromotor K2	Nur abnehmbare Motorhülse	8430, 84300, 8431, 84310, 843020	teilweise	
Chir. Motore	Motor samt Schlauch	833910	ja	
ZEG Newtron, Newtron Licht	Nur abnehmbares Handstück ohne Spitze	8387, 838710	teilweise	
Drehmomentschlüssel ZEG	Drehmomentschlüssel blau	F81322	ja	
Elektrochirurgie	Nur abnehmbares Handstück ohne Elektroden	2805	teilweise	
Polylicht Mini LED, Scan-Wave	Nur Lichtleiter	8185, 818510, 8185100	teilweise	
Beachten Sie die Sterilisationskennzeichnungen auf den Komponenten. Sterilisation mittels Heißluftsterilisatoren ist nicht zulässig!			*) eingeschweißt sterilisieren bei 134°C, 2,1bar, min. 3 Minuten Haltezeit	
Nicht sterilisierbare Komponenten:				
U1280 Schwingengerät	Griffhülse UT1280 (aus POM)	26.000-244	Nein	spezielle Anfertigung
Druckwasserflaschen		8128F,8164F,819090	Nein	
Instrumentenschläuche			Nein	Ausnahme:Schlauch chir.Motor